



ДЖГУТ ТУРНИКЕТ КРОВОСПИННИЙ YELLOW&BLUE

ТУ У 21.2-2835811272-001:2022


СВІДОЦТВО НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК № 45536

Інструкція по використанню для верхньої кінцівки
тобто без роз'єднання пряжки з гачком

Спосіб використання для нижньої
кінцівки, або якщо петлю турнікета
використати не можливо кроки 1b-4b

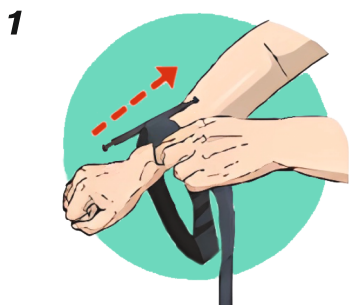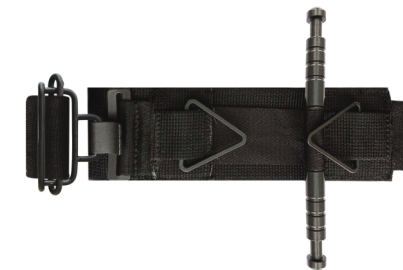

1
Готову петлю турнікета
натягніть на кінцівку

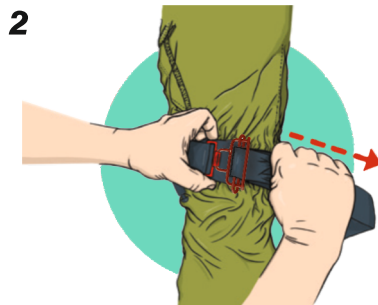

2
Дуже щільно затягніть
ремін у пряжці




3
Крутить вороток до
зупинки кровотечі



4
Зафіксуйте вороток
у одному з трикутників



5
Вкажіть час
накладання турнікету

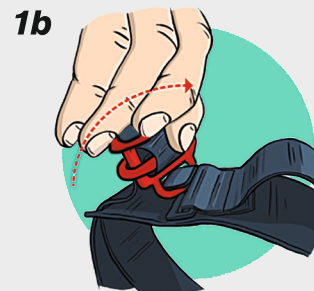


1b
Підніміть пряжку



2b
Рухом вперед витягніть
пряжку із гачка



3b
Охопити кінцівку
ременем

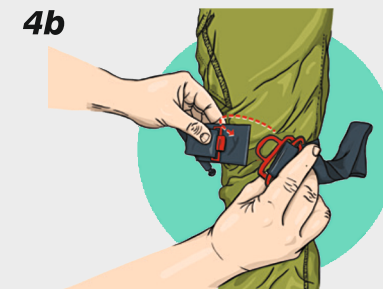

4b
Застебніть пряжку у гачок
та переходьте до кроку 2

ДЖГУТ ТУРНИКЕТ Y&B Для зупинки сильних кровотеч

Зберігайте джгут із під'єднаною пряжкою та достатньою слабиною, щоб петля джгута могла натягнутись на вашу кінцівку.

- Користуватися інструкцією
- Повторно не використовувати
- Зберігати в сухому місці

Дата виготовлення



Yellow & Blue™
Ukrainian design

Yellow & Blue™

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію турнікета зміни що не впливають на загальну функціональність виробу.

ТОВ «ЄЛЛОУ ЕНД БЛУ»
Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська 7
+38 (066) 614-68-69
LTD YELLOW & BLUE
Ukraine, c. Dnipro, st. Kursantska 7
+38 (066) 614-68-69
www.yellowandblue.com.ua

